

ialuxid[®]

Gynial SkinCare



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die Gebrauchsinformation sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Was ist ialuxid[®] Gel und wofür wird es angewendet?

ialuxid[®] Gel ist ein Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung.

ialuxid[®] Gel verhindert die Vermehrung von Keimen bei bakteriellen Hautentzündungen wie Akne, Follikulitis, Nagelbettentzündungen und Impetigo. Das Gel bildet einen Schutzfilm auf den betroffenen Hautstellen.

Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Wie ist ialuxid[®] Gel anzuwenden?

Nach Reinigung der Haut das Gel mehrmals täglich gleichmäßig auf die betroffenen Stellen auftragen.

Inhaltsstoffe

AQUA, HYDROGEN PEROXIDE, CARBOMER, XANTHAN GUM, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SQUALANE, GLYCINE, SODIUM HYALURONATE, POLYSORBATE 60, OXYQUINOLINE SULFATE.

Was sollten Sie vor der Anwendung von ialuxid[®] Gel beachten?

- ialuxid[®] Gel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
- ialuxid[®] Gel ist nur zum Auftragen auf die Haut bestimmt.
- Nicht auf Wundnähte auftragen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich kaltem Wasser spülen.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

ialuxid[®] Gel ist im Allgemeinen gut verträglich. Bei empfindlicher Haut kann es zu Beginn ein leichtes Brennen oder Spannungsgefühl hervorrufen. Bei septischen Wunden entscheidet Ihr Arzt, ob eine lokale oder systemische Behandlung mit einem Antibiotikum notwendig ist. Bei Unverträglichkeit informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie ist ialuxid[®] Gel aufzubewahren?

- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- trocken aufbewahren, vor direkter Hitze schützen
- nicht über 25 Grad Celsius lagern
- Tube nach Gebrauch wieder verschließen
- die Haltbarkeit bezieht sich auf richtige Lagerung.



Scannen Sie diesen QR-Code und erfahren Sie mehr über ialuxid[®] Gel und weitere Gynial SkinCare Produkte!
www.gynial.com

EU Vertretung: BMG Pharma s.r.l. | Via Confalonieri 29 | 20124 Milan | Italy
Hersteller: BMG Pharma LLC | 824 Highway 88 | Gardnerville | NV 89460 | USA

Vertrieb Österreich: Gynial GmbH | Gablenzgasse 11/III | 1150 Wien | www.gynial.com



CE 0373



Rev2, December 2010

010307