


# Elyth-Salbe W

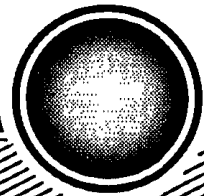

## Wund- und Heilsalbe

Medizinprodukt mit antibakterieller und abschwellender physikalischer Wirkung

### Zusammensetzung

100 g Salbe enthalten als wirksame Bestandteile:

50 g ionisierte Spurenelement-/Elektrolytlösung; diese enthält: Eisen, Zink, Mangan, Natrium, Magnesium, Spurenelement Complex.

Sonstige Bestandteile (Hilfsstoffe):

50 g Salbengrundlage (CTFA): Hydrogenated Palm Glycerides, Cetyl Alcohol, PEG-200 Glyceryl Tallowate, Octyldodecanol, Ethoxydiglycol and Diisopropyl Adipate and Methylparaben and Dehydroacetic Acid and Isopropyl Sorbate and Propylparaben.

### Anwendungsgebiete

Zur äußerlichen Anwendung bei

- Schürf-, Schnitt- und Risswunden,
- Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen,
- Schwellungen, Blutergüssen,
- Verbrennungen (Klasse I und II),
- schlecht heilenden Wunden und entzündlichen Erkrankungen der Haut (in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden der Wundheilung wie z.B. Verbandstoffen).

### Anwendung

Elyth-Salbe W mehrmals täglich auf die verletzten Gebiete bzw. Wunden 1-2 mm dick auftragen und gleichmäßig verteilen.

Zur Erstversorgung von Sport- und Unfallverletzungen Elyth-Salbe W sofort reichlich auftragen und Verband anlegen. Mehrmals täglich (ca. alle 3 Stunden) wiederholen.

### Dauer der Anwendung

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Erkrankung.

### Gegenanzeigen und Nebenwirkungen

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sind keine bekannt.

## **Eigenschaften**

Durch die Kombination mit einem Verbandstoff wird die Wunde geschützt. Die Wirkung der Salbe beruht auf physikalischem Austausch in der epidermalen Schicht der Haut. Elyth-Salbe W enthält als wirksame Bestandteile ionisierte Spurenelemente und Elektrolyte.

Während des Heilungsprozesses werden diese im Verletzungs- und Wundgebiet vermehrt benötigt. Sollten sie fehlen oder in zu geringer Menge vorhanden sein, kann davon ausgegangen werden, dass das Stoffwechselgeschehen verbunden mit der Heilung auf breiter Basis verlangsamt bzw. reduziert ist.

Durch Elyth-Salbe W werden diese ionisierten Spurenelemente und Elektrolyte dem Körper in einem ausgewogenen Verhältnis direkt an der geschädigten oder verletzten Stelle für den Heilungsprozeß zur Verfügung gestellt.

Dadurch werden Blutergüsse / Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Operationen oder Verletzungen verbessert und die Narbenbildung verringert.

Die Wirkstoffe der Elyth-Salbe W erlauben auch einen Einsatz im Mund-, Augen- und Schleimhautbereich.

## **Besondere Hinweise**

Elyth-Salbe W ist zur Iontophorese geeignet. Sie wird unter der Anode aufgetragen.

## **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Elyth-Salbe W gibt es in Tuben zu 100 g und in Klinikpackungen mit 1000 g (10 x 100 g).

**Nicht über +25°C lagern und größere Temperaturschwankungen vermeiden.**

**Medizinprodukt nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden! Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur zur äußerlichen Anwendung!**

Sollten Sie Fragen zu Elyth-Salbe W haben, wenden Sie sich bitte an uns. Gute Besserung wünscht Ihnen

## **winpharma**

Herstellungs- und Vertriebs-GmbH, Untere Hauptstr. 10  
A-3150 Wilhelmsburg, [www.winpharma.at](http://www.winpharma.at)

Stand: 10/03

Verwendbar bis: siehe Tubenfalz

 0408