

Megadent Megadent Megadent Megadent Megadent Megadent

Refit

Provisorischer Zahnzement

Refit ist ideal für das vorübergehende Befestigen herausgefallener Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen (festsetzende Prothesen), die normalerweise dauerhaft im Gebiss fixiert sind. Zur Anwendung bitte den nachstehenden Anweisungen folgen. Danach möglichst bald einen Zahnarzt konsultieren. Vor dem Öffnen der Packung sollten die Zähne gründlich geputzt werden. Danach die herausgefallene Prothese gründlich waschen und reinigen. Falls erforderlich trockene Zementreste mit einer Nadel von der Prothese entfernen. Dann die Prothese auf den Zahn bzw. die Zähne aufsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Prothese fest und bequem sitzt sowie auch bei geschlossenem Kiefer nicht wackelt.

Gebrauchsanweisung

1. Eine Kapsel aus der Packung nehmen. Durch leichtes Antippen das Pulver in der größeren Kapselhälfte sammeln. Dann die Kapsel öffnen.
2. Ungefähr drei Tropfen Wasser aus dem Wasserhahn in die Kapselhälfte mit dem Pulver tropfen lassen.
3. Die Kapsel schnell wieder verschließen.
4. Die Kapsel zwischen Daumen und Mittelfinger halten und drei Sekunden lang schütteln.
5. Die Kapsel öffnen und das Zementgemisch auf der Passfläche der Prothese anbringen. Jetzt die Prothese wieder einsetzen und hin- und herbewegen, bis sie fest sitzt.
6. Das Gebiss schließen, um zu überprüfen, ob die Prothese bequem sitzt. Falls dies nicht der Fall ist, die Prothese schnell entfernen und den Vorgang wiederholen.
7. Nicht länger als 28 Tage verwenden.


Aufbewahrung

Nach Verwendung gut verschließen. Kühl und trocken aufbewahren.

Zusammensetzung

Zinkoxid 64,93%, Polyacrylsäure 22%, Magnesiumoxid 13%, Eisenoxid 0,07%

PZN 03149926

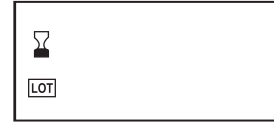

G.A.P. Research Company Ltd.
Unit 2 Ebbsfleet
Business Park,
Stonebridge Road,
Northfleet, Kent, DA11 9DZ

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH
Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf, DE
Tel. +49 211 17754 0
www.megadent.de



Denvtech Ltd., Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf, Dublin 3, D03 P590



Ein praktischer Zement für das vorübergehende Befestigen festsetzender Zahnprothesen (Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen)

Issue 1 - 11-2024



Refit
Provisorischer Zahnzement



Megadent Refit

Megadent Refit



Ein praktischer Zement für das vorübergehende Befestigen festsetzender Zahnprothesen (Kronen, Brücken, Verblendungen, Gussfüllungen und Teilkronen)

3 Kapseln



Made in U.K.

3 vordosierte Kapseln für vorübergehendes Zementieren
WASSER ZUFÜGEN, MISCHEN UND ANWENDEN

Refit
Provisorischer Zahnzement

Megadent

