

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

Calma™

DE Gebrauchsanweisung



Vielen Dank, dass Sie sich für Calma entschieden haben. Seit fast 50 Jahren entwickelt Medela innovative Produkte, um die Gesundheit von Babys durch die lebensspendenden Vorteile der Muttermilch zu fördern. Calma ist ein vertrauenswürdiges Produkt, das auf Grundlage fundierter Forschungsergebnisse entwickelt wurde. Diese Studien belegen, dass Ihr Baby mit Calma das gleiche Saugverhalten beibehalten kann wie beim Stillen an der Brust. Ihr Baby wird das Stillen immer bevorzugen und davon mehr profitieren. Wenn Sie jedoch einmal nicht bei Ihrem Baby sein können, bietet Calma eine ausgezeichnete Alternative, um die Stillbeziehung zwischen Ihnen und Ihrem Baby aufrechtzuerhalten. Calma wurde entwickelt, um gesunde, termingeborene Babys mit Muttermilch zu ernähren.

Inhaltsverzeichnis

4

1. Verwendungszweck	5
2. Bedeutung der Symbole	6
3. Wichtige Sicherheitshinweise	8
4. Produktbeschreibung	10
4.1 Calma: ein einzigartiges Produkt für Mutter und Kind	10
4.2 Bestandteile	11
4.3 Material	11
5. Reinigung	12
5.1 Vor dem ersten Gebrauch	12
5.2 Nach jedem Gebrauch	13
5.3 Einmal täglich	15
6. Füttern vorbereiten	16
6.1 Schritte zur Vorbereitung	16
6.2 Calma zusammensetzen	17
7. Füttern	18
7.1 Korrekte Saugposition	18
7.2 Füttern	19
8. Calma auseinandernehmen	20
9. Aufbewahren und Auftauen der Muttermilch	20
9.1 Aufbewahrung	21
9.2 Einfrieren	21
9.3 Auftauen	21
10. Wussten Sie schon? Häufig gestellte Fragen	22
11. Entsorgung	24
12. Rundum versorgt in der Stillzeit	25

1. Verwendungszweck



Calma ist dafür vorgesehen, gesunde, termingeborene Babys mit Muttermilch zu ernähren. Calma eignet sich nicht dazu, künstliche Säuglingsnahrung zu füttern.

Dank Calma kann Ihr Baby sein natürliches, an der Brust erlerntes Saugverhalten beibehalten. Bei der Verwendung eines herkömmlichen Saugers muss Ihr Baby eine neue Saugtechnik erlernen. Deshalb empfiehlt Medela, bereits ab der ersten Gabe abgepumpter Muttermilch ausschließlich Calma zu verwenden.

Falls Ihr Baby bereits einen anderen Sauger benutzt hat sollte, Ihnen bewusst sein, dass Calma anders funktioniert. Bei Calma wird der Milchfluss durch das Saugverhalten Ihres Babys im Zusammenspiel mit dem Milchfluss-Kontrollsystems von Calma beeinflusst. Dieser Vorgang ist anders als bei herkömmlichen Saugern – haben Sie also ein wenig Geduld.

Calma können Sie mit allen Muttermilchflaschen von Medela verwenden.

2. Bedeutung der Symbole

6

Das Warnsymbol kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Missachtung kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung von Calma führen. Es gibt verschiedene Warnsymbole. Jedes Symbol wird zusammen mit einem bestimmten Wort verwendet. Die Kombinationen aus Symbol und Wort bedeuten:



Vorsicht

Missachtung von Anweisungen dieser Art kann zu (geringfügigen) Verletzungen oder Verunreinigungen/Entwicklung von Bakterien führen.



Hinweis

Missachtung von Anweisungen dieser Art kann zu Sachschäden führen.



Info

Nützliche und wichtige Informationen, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Symbole auf der Verpackung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Material Teil eines Recycling-Prozesses ist.



Dieses Symbol zeigt eine Kartonverpackung an.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt vor Sonnenlicht zu schützen ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass das zerbrechliche Produkt mit Vorsicht zu behandeln ist.



Dieses Symbol zeigt die Temperaturbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt die Luftfeuchtigkeitsbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt die Luftdruckbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt trocken zu lagern ist.



Dieses Symbol zeigt die GTIN (GS1 Global Trade Item Number) an.



Dieses Symbol zeigt an, dass in der Gebrauchsanweisung nachzuschlagen ist.



Dieses Symbol zeigt den Recycling-Code an (hier 01 für Teile aus PET).



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produktmaterial für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen ist.

EN 14350

Dieser Code zeigt die Europäische Norm betreffend „Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Artikel für flüssige Kindernahrung“ an.

Symbole auf dem Gerät/in der Gebrauchsanweisung



Dieses Symbol weist auf den Hersteller hin.

PP

Dieses Symbol zeigt die Verwendung von Polypropylen an.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

8



Missachtung der Sicherheitshinweise auf diesen Seiten kann zu Gefährdungen führen.

Gerät



Calma ist nicht hitzebeständig: Halten Sie Calma von Heizkörpern und offenem Feuer fern.



Setzen Sie Calma nicht direktem Sonnenlicht aus.



Vor jedem Gebrauch überprüfen: Ziehen Sie den transparenten Silikon Aufsatz in alle Richtungen, um sicherzustellen, dass er unbeschädigt ist. Entsorgen Sie die Teile beim Auftreten erster Schäden oder Schwachstellen umgehend.



Aus Hygienegründen empfehlen wir, Calma nach 3 Monaten zu ersetzen.

Wichtig:

- I Gehen Sie mit den Flaschen und Bestandteilen entsprechend vorsichtig um.
- I Plastikflaschen und andere Bestandteile können durch Einfrieren brüchig werden und zerbrechen, wenn sie herunterfallen.
- I Zudem können Flaschen und andere Bestandteile durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden, z. B. wenn sie fallen gelassen, zu fest zugeschraubt oder umgestoßen werden.
- I Verwenden Sie die Muttermilch nicht, wenn die Flasche oder Bestandteile beschädigt wurden.

Verwendung



Benutzen Sie Calma ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszweck.



Verwenden Sie Calma nicht, wenn Sie schlafen oder übermäßig müde sind.



Dieses Produkt ist für nur einen Benutzer bestimmt. Die Benutzung durch mehr als eine Person kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.



Alle Einzelteile, die nicht unmittelbar verwendet werden, dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

- | Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- | Verwenden Sie Sauger niemals als Schnuller.
- | Andauerndes und übermäßig langes Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- | Überprüfen Sie immer die Temperatur der Muttermilch vor der Verwendung (Verbrennungsgefahr).
- | Erwärmen Sie die Muttermilch nicht in der Mikrowelle, da sie möglicherweise ungleichmäßig erhitzt wird und bei Ihrem Baby zu Verbrennungen führen kann.

4. Produktbeschreibung

10

4.1 Calma: ein einzigartiges Produkt für Mutter und Kind

Calma sieht nicht nur anders aus, Calma *ist* anders. Im Gegensatz zu herkömmlichen Saugern erlaubt Calma Ihrem Baby, das natürliche, an der Brust erlernte Saugverhalten beizubehalten.

Mit Calma ...


- ... kann Ihr Kind problemlos wieder zurück zur Brust wechseln. Es muss kein neues Trinkverhalten erlernen.
- ... kann Ihr Baby in seinem eigenen natürlichen Rhythmus trinken, pausieren und atmen. Ihr Baby bleibt während und nach dem Füttern ruhig und entspannt.
- ... bestimmt Ihr Baby den Milchfluss, nicht Sie. Dies entspricht der Situation, wenn Ihr Baby an Ihrer Brust trinkt.

Weitere Informationen über das Füttern finden Sie in Kapitel 7.



4.2 Bestandteile

Informationen über Ersatzteile und Zubehör finden Sie in Kapitel 12.

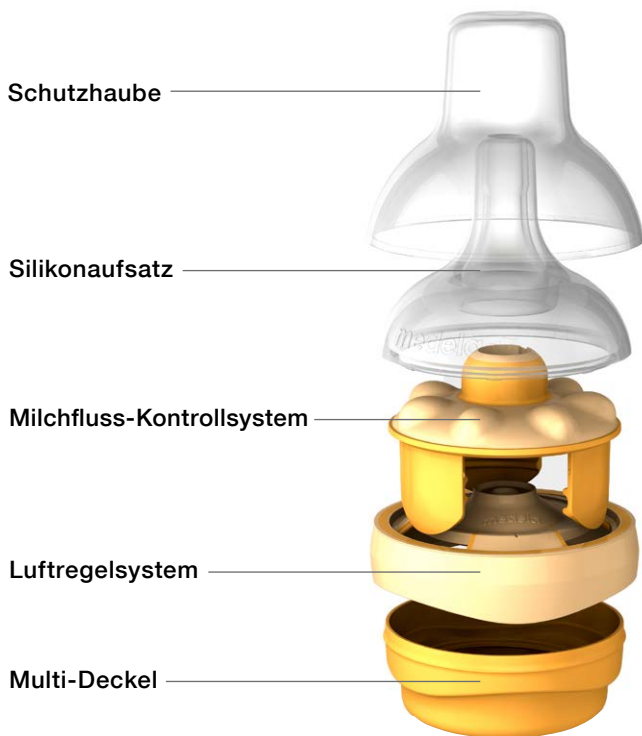

4.3 Material

I Schutzhaube / Multi-Deckel:

Polypropylen

I Silikonaufsatz:

Silikon

I Luftregelsystem /

Milchfluss-Kontrollsystem:

Polypropylen und thermoplastisches Elastomer

5. Reinigung

12



Vorsicht

- I **Reinigen Sie alle Teile sofort nach Gebrauch, um das Eintrocknen von Milchresten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern.**
- I Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität.
- I Reinigen Sie Calma nicht mit scharfen oder harten Gegenständen (wie Bürsten, Zahnstochern oder scharfen Fingernägeln).
- I Vermeiden Sie es, die Innenseite der Teile nach dem Reinigen zu berühren, um Verunreinigungen zu verhindern.
- I Bewahren Sie Calma bis zum nächsten Gebrauch in einem luftdurchlässigen, sauberen Beutel/Behälter oder eingehüllt in ein luftdurchlässiges, sauberes Papier/Tuch auf.



Hinweis

- I Wenn Sie Calma in der Geschirrspülmaschine reinigen, können sich Teile verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion.
- I Setzen Sie Calma nicht länger als empfohlen Hitze oder direktem Sonnenlicht aus, da dies Calma beeinträchtigen könnte.

5.1 Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie Calma zum ersten Mal benutzen, müssen Sie das Produkt gründlich reinigen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- I Führen Sie zuerst die Schritte aus, die in Kapitel 5.2 (nach jedem Gebrauch) beschrieben sind.
- I Führen Sie anschließend die Schritte aus, die in Kapitel 5.3 (einmal täglich) beschrieben sind.



Alle Teile mit viel warmem Seifenwasser (circa 30 °C) sanft reinigen.

5.2 Nach jedem Gebrauch (Teil 1)

1



Weitere Einzelheiten
finden Sie in Kapitel 8,
Schritte 1–3

Das Produkt in seine Einzelteile zerlegen.

2



Alle Teile mit kaltem Wasser (circa 20 °C) abspülen. Teile auf Schäden prüfen und beim Auftreten erster Schäden oder Schwachstellen umgehend entsorgen.

4



Alle Teile mit kaltem Wasser (circa 20 °C) für 10–15 Sekunden nachspülen.

5



Mit sauberem Tuch abtrocknen oder auf sauberem Tuch trocknen lassen.

5. Reinigung

14



Vorsicht

- I Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität.
- I Berühren Sie nach der Sterilisierung die Innenseite der Teile nicht, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- I Bewahren Sie Calma bis zum nächsten Gebrauch in einem luftdurchlässigen, sauberen Beutel/Behälter oder eingehüllt in ein luftdurchlässiges, sauberes Papier/Tuch auf.



Hinweis

- I Beim Auskochen der Teile können Sie dem Wasser einen Teelöffel Zitronensäure hinzufügen, um Kalkablagerungen zu verhindern. Bei der Verwendung von Zitronensäure können geringfügige Spuren auf den Teilen von Calma zurückbleiben. Verwenden Sie Wasser in Trinkwasserqualität, um diese abzuwaschen. Trocknen Sie Calma, wie in Abbildung 3 gezeigt.
- I Setzen Sie Calma nicht länger als empfohlen Hitze oder direktem Sonnenlicht aus, da dies Calma beeinträchtigen könnte.

5.2 Nach jedem Gebrauch (Teil 2)



Alternative zu Schritt 2, 3, 4 und 5 auf den vorhergehenden Seiten: Calma im Geschirrspüler reinigen. Wenn Sie Calma im Geschirrspüler reinigen, legen Sie die Teile ins obere Gitter oder ins Besteckfach.

5.3 Einmal täglich

1



Weitere Einzelheiten
finden Sie in Kapitel 8,
Schritte 1–3

Das Produkt in seine Einzelteile zerlegen.

2a



oder

Alle Teile mit Wasser bedecken,
für fünf Minuten auskochen.

2b



Verwenden Sie den Quick
Clean-Mikrowellenbeutel*
gemäß Gebrauchsanweisung.

3



Mit sauberem Tuch abtrocknen
oder auf sauberem Tuch
trocknen lassen.

6. Füttern vorbereiten

16



Vorsicht

- I Waschen Sie die Hände gründlich (etwa eine Minute) mit Seife und Wasser, bevor Sie Calma berühren.
- I Erwärmen Sie die gelagerte Milch mit aufgesetztem Multi-Deckel (siehe Abbildung)! Erwärmen Sie die Milch auf max. 30 °C.



Multi-Deckel

Max. 37 °C

- I Führen Sie alle Schritte sorgfältig und in der richtigen Reihenfolge aus.



Hinweis

- I Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Medela.
- I Prüfen Sie die Teile von Calma vor Gebrauch auf Abnutzung/Beschädigung. Ersetzen Sie beschädigte Teile, falls nötig.
- I Alle Teile müssen vor Gebrauch komplett trocken sein.
- I Setzen Sie Calma nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus.



Info

- I Der Multi-Deckel kann zum Verschließen der Flasche während des Transports verwendet werden. Der Multi-Deckel kann auf der Unterseite von Calma für die Aufbewahrung verwendet werden.

6.1 Schritte zur Vorbereitung

- I Pumpen Sie die Muttermilch ab und bewahren Sie diese auf. Hinweise zur Aufbewahrung finden Sie in Kapitel 9.
- I Reinigen Sie Calma, wie in Kapitel 5 gezeigt.
- I Setzen Sie Calma zusammen, wie auf diesen Seiten beschrieben.
- I Wärmen Sie die aufbewahrte Muttermilch auf. Erwärmen Sie die Milch auf max. 30 °C!
- I Setzen Sie Calma erst kurz vor dem Füttern auf die Flasche.



Den unteren Rand über das Milchfluss-Kontrollsystem stülpen.

6.2 Calma zusammensetzen

1



Nehmen Sie den Silikon Aufsatz. Unteren Rand nach oben stülpen. Die Spitze des Silikon Aufsatzes nicht berühren!

2



Silikon Aufsatz (mit hochgestülptem Rand) über die Ausbuchtung im Milchfluss-Kontrollsystem drücken.

4



Zusammengesetzten Teil auf das Luftregelsystem setzen. Prüfen, ob alle Teile richtig zusammengesetzt sind.

5



Flasche mit Muttermilch füllen. Calma kurz vor dem Füttern auf die Flasche setzen.

7. Füttern

18

i Info

- I Sie können Ihr Baby dazu bringen, den Mund zu öffnen und Calma anzunehmen, indem Sie wie beim Stillen seine Lippe berühren.
- I Haben Sie etwas Geduld. Eventuell benötigt Ihr Baby etwas Zeit, bis es aus Calma trinkt. Schließlich kommt es dabei zum ersten Mal mit künstlichem Material anstelle der vertrauten Brust in Berührung. Dies ist neu für Ihr Baby. Im Gegensatz zum Stillen kann es Sie und Ihre Milch nicht riechen.



7.1 Korrekte Saugposition

- I Halten Sie Ihr Baby in einer halb aufrechten Stellung.
- I Halten Sie Calma in einem Winkel von ungefähr 45 Grad zur Unterlippe Ihres Babys.
- I Wenn Ihr Baby den Mund öffnet, setzen Sie Calma auf die Spitze seiner Zunge. Stoßen Sie Calma nicht in den Mund hinein. Ihr Baby wird Calma so weit in den Mund nehmen wie nötig, so wie es Ihr Baby beim Stillen an der Brust mit der Brustwarze gelernt hat (siehe Bilder 1a und 1b auf der nächsten Seite).
- I Lassen Sie Calma während dem gesamten Trinkvorgang in der Position, die Ihr Baby gewählt hat. Ihr Baby muss ein Vakuum erzeugen, um den Milchfluss in Gang zu bringen (siehe Bilder auf der nächsten Seite). Herausziehen oder Hineindrücken von Calma würde diesen Vorgang stören. Ihr Baby könnte sich dadurch auch verschlucken.


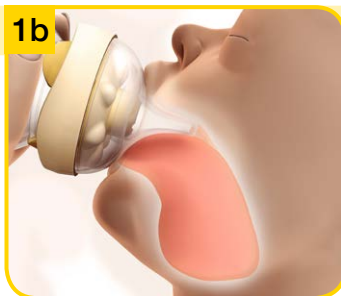


Bild 1a oben zeigt, wie Ihr Baby während des Stillens die Brustwarze im Mund hält.
Bild 1b zeigt die richtige Saugposition, wenn Sie Ihr Kind mit Hilfe von Calma füttern.

7.2 Füttern

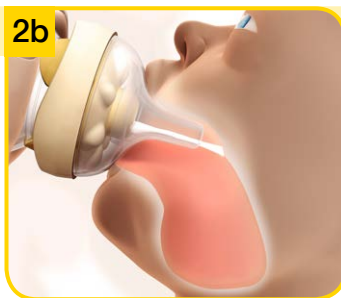

Beim Stillen muss Ihr Baby ein Vakuum erzeugen, damit die Milch fließt. Die Milch fließt dann, wenn das Vakuum im Mund Ihres Babys am stärksten ist. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Zunge Ihres Babys am tiefsten Punkt und die Brustwarze wird in den Mund Ihres Babys gezogen (siehe Bild 2a oben).

Calma funktioniert in vergleichbarer Weise. Ihr Baby muss sich ähnlich verhalten, um ein Vakuum zu bilden und dadurch den Milchfluss anzuregen (siehe Bild 2b oben). Deshalb ist es wichtig, dass Sie Calma während des gesamten Trinkvorgangs in der Position lassen, die Ihr Baby gewählt hat.

8. Calma auseinandernehmen

20



Vorsicht

Reinigen Sie alle Teile sofort nach Gebrauch, um das Eintrocknen von Milchresten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

1



Calma von der Flasche nehmen.

2



Den Silikon Aufsatz mit dem Milchfluss-Kontroll-System vom Luftregelsystem entfernen.

3



Den unteren Rand des Silikon Aufsatzes nach oben stülpen. Den Silikon Aufsatz vom Milchfluss-Kontroll-System entfernen.

Calma ist nun zerlegt. Alle Teile wie in Kapitel 5 beschrieben reinigen.

9. Aufbewahren und Auftauen der Muttermilch

9.1 Aufbewahrung

Regeln für das Aufbewahren frisch abgepumpter Muttermilch (für gesunde, termingeborene Babys)

Raumtemperatur	Kühlschrank	Tiefkühltruhe	Aufgetaute Muttermilch
4–6 Stunden bei 19 bis 26 °C (66 bis 78 °F)	3–8 Tage bei 4 °C (39 °F) oder tiefer	6–12 Monate -18 bis -20 °C (0 bis 4 °F)	Im Kühlschrank max. 10 Stunden. Nicht wieder einfrieren!

I Bewahren Sie Muttermilch nicht in der Kühlschranktür auf. Wählen Sie stattdessen den kältesten Ort im Kühlschrank (hinten auf dem Glasregal oberhalb des Gemüsefachs).

9.2 Einfrieren

I Die abgepumpte Muttermilch können Sie in Milchflaschen oder in „Pump & Save“-Beuteln einfrieren. Befüllen Sie Flaschen oder „Pump & Save“-Milchbeutel beim Einfrieren nur zu $\frac{3}{4}$, um Platz für Ausdehnung zu lassen.

I Versehen Sie Milchflaschen oder „Pump & Save“-Milchbeutel mit dem Abpumpdatum.

9.3 Auftauen



Vorsicht

Verwenden Sie keine Mikrowelle zum Auftauen oder Erwärmen von Muttermilch, und wärmen Sie die Muttermilch auch nicht in kochendem Wasser auf, damit Vitamine, Mineralien und andere wertvolle Inhaltsstoffe erhalten bleiben und Verbrühungen vermieden werden.

I Um die Inhaltsstoffe der Muttermilch zu erhalten, tauen Sie die Milch am besten über Nacht im Kühlschrank auf. Ersatzweise können Sie die Flasche oder den „Pump & Save“-Beutel auch unter warmes Wasser (max. 30 °C) halten.

I Schwenken Sie die Milchflasche oder den „Pump & Save“-Beutel sanft, um abgesetztes Fett mit der Milch zu vermischen. Schütteln oder rühren Sie die Milch nicht.

10. Wussten Sie schon? Häufig gestellte Fragen

22

Sieht Calma nicht ein bisschen zu lang aus?

Auch wenn Sie den Eindruck haben, Calma wäre ein wenig zu lang, können wir Sie beruhigen – die Länge ist perfekt. Ihre Brustwarze kann sich im Mund Ihres Babys während des Stillens um das Zweifache verlängern. Calma erreicht im Mund Ihres Babys die gleiche Stelle wie Ihre Brustwarze. Natürlich spielt dabei eine wichtige Rolle, dass Ihr Baby korrekt angelegt ist (siehe Kapitel 7 für weitere Einzelheiten).

Ist eine einzige Größe wirklich ausreichend?


Es mag Sie vielleicht erstaunen, aber eine Saugergröße reicht für die gesamte Stillzeit völlig aus. Ihre Brüste verändern sich ja auch nicht während der Stillzeit. Der Milchfluss, die Form und Länge von Calma sind so konzipiert, dass sie auch dann noch den Bedürfnissen Ihres Babys entsprechen, wenn es während der Stillzeit wächst.

Hilft Calma Blähungen zu vermeiden?

Calma kann dazu beitragen, Blähungen zu vermeiden, denn die Milchflasche wird durch unser einzigartiges Luftregelsystem belüftet. Im Gegensatz zu vielen anderen Trinkflaschen hat Calma den Vorteil, dass das Luftregelsystem unabhängig davon, wie die Flasche zusammengesetzt wird, immer funktioniert.

Woher kommt die Milch?

Die Milch fließt durch ein kleines Loch im Milchfluss-Kontrollsystem im oberen Teil von Calma (siehe Bild). Der Milchfluss wird durch das Zusammenspiel von Milchfluss-Kontrollsystem und dem vom Baby gebildeten Vakuum bestimmt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Saugern führt das Zusammendrücken von Calma nicht dazu, dass Milch fließt. Doch Sie können sicher sein, dass Ihr Baby aus eigener Kraft genügend Milch saugen kann. Beachten Sie, dass Sie Calma nicht mit scharfen oder harten Gegenständen (wie Bürsten, Zahnstochern oder scharfen Fingernägeln) reinigen sollten.

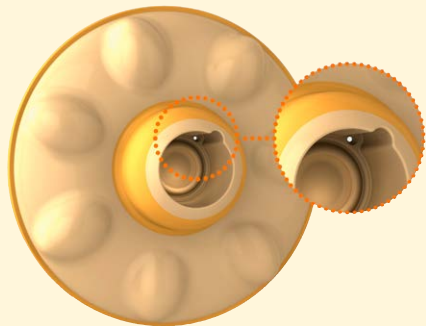

Warum tropft Calma manchmal ein wenig?

Es gibt zwei Fälle, in denen Calma etwas tropfen kann.

I Am Ende des Fütterns kann es vorkommen, dass Ihr Baby Calma freigibt, bevor es die Milchportion getrunken hat, die es zuletzt aus der Flasche aufgenommen hat.

I Wenn Sie die Flasche auf den Kopf drehen, können ebenfalls einige Tropfen Milch aus Calma entweichen. Dies liegt daran, dass die Membrane im Milchfluss-Kontrollsystem nicht hart, sondern flexibel ist. Ob es zu einem (geringfügigen) Tropfen kommt, hängt von der Temperatur und dem Gewicht der Milch ab, die gegen die Membrane drückt. Beachten Sie, dass vereinzelt Tropfen keinerlei Auswirkung auf die korrekte Funktionsweise von Calma hat.

Wann sollte ich Calma ersetzen?

Aus Hygienegründen empfehlen wir, Calma nach drei Monaten zu ersetzen.



11. Entsorgung

24

Entsorgen Sie Calma in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.



12. Rundum versorgt in der Stillzeit

Die folgenden Produktvarianten und Zubehörteile können über Medela-Verkaufsstellen bezogen werden. Geben Sie bei der Bestellung eines Produkts bitte die Produkt- bzw. Artikelnummer an.

25

Produktvarianten

Artikelnummer	Produkt
008.0138	Calma Solitaire (DE/FR)
008.0139	Calma Solitaire (EN/FR)
008.0140	Calma Solitaire (NL/FR)
008.0141	Calma Solitaire (ES/PT)
008.0142	Calma Solitaire (IT/PL)
008.0143	Calma Solitaire (SV/DA)
008.0144	Calma Solitaire (NO/FI)
008.0145	Calma Solitaire (RU/HU)
008.0146	Calma Solitaire (TR/CS)
008.0147	Calma Solitaire (EL/HE)
008.0148	Calma Solitaire (EN/JA)
008.0149	Calma Solitaire (EN/ZH)
008.0150	Calma Solitaire (TW/KO)
008.0203	Calma Solitaire (EN/AR)
008.0208	Calma Solitaire (EN/TW)

Zubehör

Artikelnummer	Produkt
800.0796	Muttermilchflaschenset 150 ml, 3 Stück (EN/DE/FR/IT/NL)
800.0797	Muttermilchflaschenset 150 ml, 3 Stück (EN/ES/PT/EL/HE)
008.0072	Muttermilchflaschenset 150 ml, 3 Stück (EN/JA/KO/TW/ZH)
008.0073	Muttermilchflaschenset 150 ml, 3 Stück (EN/RU/HU/CS/TR)
008.0074	Muttermilchflaschenset 150 ml, 3 Stück (EN/SV/DA/NO/PL)
200.1659	Muttermilchflaschenset 250 ml, 2 Stück (EN/DE/FR/IT/NL)
008.0091	Muttermilchflaschenset 250 ml, 2 Stück (EN/JA/KO/TW/ZH)
008.0075	Muttermilchflaschenset 250 ml, 2 Stück (EN/SV/DA/NO/PL)
008.0137	Muttermilchflaschenset 250 ml, 2 Stück (EN/ES/PT/EL/HE)

Weitere Medela-Produkte finden Sie unter www.medela.de.





Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Germany & Austria

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax +49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Switzerland

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch